

Respirátor FFP2 / KN95

Účelem respirátoru je ochrana jeho nositele filtrací vdechového vzduchu a snížení přenosu infekce mezi osobami. Účinnost minimálně 95 % proti pevným a kapalným aerosolům, neobsahující olej. Jedná se o jednorázový prostředek. Doporučená doba použití 8 hodin.

Návod na použití: 1) Otevřete respirátor, uchopte jej pouze za gumičky, aby nedošlo ke kontaminaci.
2) Přiložte k obličejí a gumičky natáhněte za uši.
3) Pomocí prstů zakřivte nosní můstek tak, abyste dali masce v tomto místě tvar nosu.
4) Položte ruce na masku a hluboce vydechněte a vdechněte. Jestliže bude po bocích masky vycházet vzduch, anebo jestliže do masky vnikne vzduch přes boční části, upravte masku na obličejí.

Pokyny pro skladování:
Chraňte před slunečním zářením a před vlhkem.

Upozornění: -Vždy se ujistěte, že výrobek je kompletní, správně nasazen a nošen po celou dobu expozice.
-Tento prostředek nechrání proti plynům/výparům.
-Tento prostředek nepoužívejte jako ochranu před atmosférickými kontaminanty, již koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví či život.
-Nepoužívejte, máte-li vousy nebo jakékoliv jiné ochlupení obličejí, které by mohlo zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem.
-Zničte a vyměňte, jestliže je kontaminován krví nebo jinými infekčními kontaminanty, když je poškozen, když se dýchání stává obtížným. Po ukončení jeho používání zajistěte jeho likvidaci v souladu s požadavky směrnice na likvidaci nebezpečného infekčního materiálu.

Informace o výrobci a datu výroby včetně jeho expirace jsou uvedeny na obalu.